

フタラール濃度チェック錠

(フタラール消毒液 0.55%「メタル」専用)

『フタラール濃度チェック錠は、フタラール濃度の判定の目安として、迅速・簡便に使用できるインディケータ錠です。』

【使用方法】

栓付きスピッツ管に、フタラール消毒液 0.55%「メタル」 5mL をスポイトでとり
(スピッツ管の線に合わせる)、濃度チェック錠 1 個を入れ、速やかに栓をし、
錠剤が完全に崩壊するまで(懸濁状態)(約 20 秒間)、上下に激しく振り混ぜたのち静置します。

【判定方法】

静置 30～60 秒後に、上澄み液の色調を観察し、判定を行います。

(下記色調見本を参照してください。)

なお、時間の経過とともに退色するため、規定の時間で判定してください。

<有効>

上澄み液が少しでも赤紫色に変化したとき、フタラール濃度は有効濃度以上です。

(フタラール濃度の低下とともに、呈色後の赤紫色は薄くなります。)

<無効>

上澄み液が赤紫色に変化しなかったとき、フタラール濃度は有効濃度未満です。

【貯法】

直射日光を避け、30℃以下の乾燥した場所に密栓して保管してください。

【取扱い上の注意】

- ・ 本品は、あくまでも有効判定の目安としてご使用ください。
- ・ 容器より取り出した錠剤は速やかに使用し、容器は直ちに密栓してください。
- ・ やわらかい錠剤ですので、欠けが生じることがあります。欠けた錠剤は、正確に判定できないため使用しないでください。

色調見本(判定例)

